




PHILIPS
RESPIRONICS

LiteTouch для
OptiChamber Diamond
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

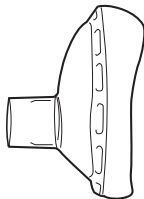

Маской для лица LiteTouch следует пользоваться исключительно в сочетании с антистатической клапанной камерой OptiChamber Diamond

Для пользования только одним пациентом.

Маска малого размера для пациентов в возрасте 0-18 месяцев

Маска среднего размера для пациентов в возрасте 1-5 лет

Маска большого размера для пациентов в возрасте старше 5 лет

Внимание: Не содержит натурального латекса.

Условия хранения: 0° F - 140° F (-18° C - 60° C);
относительная влажность: 0 - 100%

Условия эксплуатации: Следуйте условиям эксплуатации
вашего дозирующего ингалятора (MDI)

Предусмотренное применение

Маской LiteTouch следует пользоваться в сочетании с антистатической клапанной камерой (VHC) OptiChamber Diamond. Маска предназначена для облегчения приема аэрозольных лекарств из большинства дозирующих ингаляторов под давлением, применяемых с клапанными камерами, по указанию врача или медика-профессионала. Предусмотренные условия применения включают прием лекарств на дому, в больницах и клиниках.

 **Внимание**

Каждый раз до начала использования убедитесь, что внутри маски нет никакого мусора. Использование маски детьми или поблизости от детей требует присмотра. Поскольку маска – не игрушка, ей следует пользоваться только для проведения лечения и потом убрать и хранить ее в чистом, недоступном для детей месте.



Respironics Respiratory
Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park,
City Fields Way
Tangmere, Chichester,
PO20 2FT UK



Сделано в США
P3H 2013/769



www.philips.com/respironics

PN 1109086 R02




1109086 R02

Respironics, LiteTouch and OptiChamber are
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and its
affiliates. All rights reserved.

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

Бесплатная телефонная линия:
1-800-345-6443
Телефон: 1-724-387-4000

Импортер в РФ:
ООО „ГТСК“ групп
117418, Москва, а/я 86
тел: +7 (495) 718-75-91
+7 (985) 761-72-49

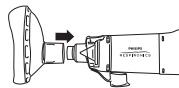

- 1 Насадите маску на мундштук VHC и легко поверните для того, чтобы ее закрепить.
- 2 Поместите маску над носом и ртом пациента.
- 3 Следуйте инструкциям по применению вашей VHC.

Чистка

Еженедельно прополаскивайте в теплой мыльной воде 2 минуты или замочите на 10 минут, промойте и высушите на воздухе.

Данные о характеристиках аэрозоля приведены на сайте <http://www.philips.com/litetouch>